


ご注意: Groomers Helperはペットグルーマー、獣医、動物トレーナーの手離されずに作業できるシステムです。ペットが噛みつける範囲が狭くなるように開発されていますが、作業者が注意を怠って使用すれば、ペットが噛みつける範囲内へ入り込む場合がある事をご留意ください。動物の安全な取扱いにおける責任は、最終的にその扱い者にあります。

ご利用にあたり商品に異常がないか毎ご使用前にご確認してください。又Groomers Helperの操作方法に精通していない方はご使用にならないでください。

●ご使用の際は出来る限りペットを落ち着かせてください。●ペットを必要以上に興奮させない為ご使用後は直ぐに拘束を外してください。●ご使用中は必ずペットのそばから離れないでください。

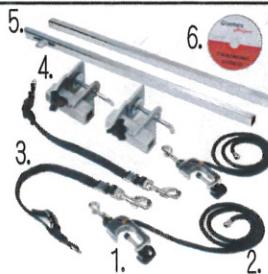

セット内容

1. Groomers Helper クランプ×2ヶ
2. ストラップ×2ヶ
3. セイフティーループ×2ヶ
4. スタンダード クランプ×2ヶ
5. ミニアーム×2ヶ
6. トレーニングDVD
7. プロテクター

本説明書はGroomers Helperのクイックスタート用です。より詳しい使い方と安全におけるヒントについては、添付のトレーニングDVDをご覧ください。

使用中は絶対にペットを単独で放置しないでください。また、騒ぎ暴れさせないでください。どうしても落ち着かない場合は、直ちに解放してください。

STEP1.

Groomers Helper クランプをお手持ちのグルーミングアームに付け、ネジを締めて適切な高さにします。ストラップはペットの方を向き、調整ノブは自分の方を向く様に取り付けてください。

注意: Groomers Helper クランプは丸パイプ18~32mm、角パイプ15~25mmのアーム棒でのみご利用できます。右利きの場合は、スライドボタンは自分の右側に、左利きの場合は左側に置きます。(ストラップがフリーになるようスライドボタンは緩めておいてください。)

STEP2.

セイフティーループとペットとつなぐ。ループは首の辺りできちんとフィットさせる。ループの締具合を締め過ぎず、緩過ぎず最適になるように金具で調節してください。発作などの緊急事態には、ループを直ぐに開放してください。

STEP3.

セイフティーループをグルーミングアーム上部に接続してください。

STEP4.

セイフティーループのD字リングをストラップのナスカン金具と接続してください。

STEP5.

ペットの通常のスタンディングからやや緩ませた状態にするためにアームの高さを調節します。優しくストラップを引き、ペットをアームそばまで寄せ、アームから好みの距離を取ったら、スライドボタンを閉めます。(Groomers Helperはセイフティーループをペットの気管から離し喉が締まることを避けます。)

先ず、あなた自身がGroomers Helperを使ってペットを落ち着かせることに慣れてください。ストラップを優しく引くことでペットとの意志の疎通を図ってください。徐々に彼らがあなたに従っていくことを感じるはずです。

ストラップをロックする前に主導権がこちらにあることをわからせましょう。しばし“綱引き”で遊んであげる事も大切です。彼らは2~3回“勝った”と思ったら落ち着きだしますので、勝ったと思わせ落ち着けましょう。

信頼関係を作りやすくなります。

ほとんどのペットは落ち着いている時か、敵意を持っていない時に望ましい好意的な反応を示します。

ペットが落ち着いたら、もっと彼らを解きほぐしてあげましょう。ストラップを緩めて、ペットをリラックスさせましょう。最低限な緩み具合でもストラップを噛むことはできません。



STEP6.

スタンダードクランプをテープルに取り付けます。ペットのそけい部の位置を確認して取り付けてください。ミニアームをスタンダードクランプの穴に入れください。ミニアームはペットの股に合わせて高さを調整してください。



STEP8.

セイフティーループをミニアームのフックに取り付けます。セイフティーループとGroomers Helperクランプのストラップをペットの股下で接続します。



STEP10.

A プロテクターを使用する場合

プロテクターをセイフティーループに被せてください。



B プロテクターを使用しない場合

ループからプロテクターを外してください。ループをストラップから外します。ループのワンタッチバックルを外し、ペットの腰を挟むように取り付けます。締め過ぎず、緩め過ぎないよう、ループを調節してください。ループとストラップを接続します。ペットが苦しくないが確認し、GroomersHelperクランプのスライドボタンをロックしてください。



Groomers Helperはこんなこともできます！



ペットのマズルをメインアームとGroomers Helperクランプに近づけてセッティングします。
頭を動かせる範囲が最小限になり、胸や足周りのカット、耳のお手入れを行うときに便利です。



メインアームに取り付けたGroomersHelperクランプのストラップを緩めます。GroomersHelperクランプをペットの頭上にセットします。その時、ストラップでペットのマズルを挟むように取り付けます。ストラップを押さえながら作業を行うことで、目の周り、マズルなど敏感な場所も安定した状態で行えます。



ミニアーム、スタンダードクランプ、GroomersHelperクランプ各1ヶを、ペットの前脚付近にセットします。STEP1から5までを行い、ペットを写真のように固定します。頭を動かしたり、噛みついたりする範囲がより狭くなり、顔周りのカットや爪切りを安全に、効率的に行うことができます。



メインアームを使わずに作業する場合。
ミニアーム、スタンダードクランプ、GroomersHelperクランプ各1ヶを前脚近くにセットします。
メインアームのGroomersHelperクランプを使用せずにミニアームに付けたGroomersHelperクランプでペットの動きを押さえます。ひげのカットがしやすくなります。

STEP7.

Groomers Helperクランプをミニアームに取り付けます。(フックが付いていないミニアームに取り付けます。)

Groomers Helperクランプの調整ノブは自分の方を向く様に取り付けてください。



STEP9.

テーブルの幅に合わせてストラップの長さを調整して、スライドボタンをロックしてください。ループが弛んだ状態ではなく、まっすぐ伸ばした状態でロックをしてください。



**Groomers
Helper®**

商品名：グルーマーズヘルパー クラシック
プロフェッショナルセット

対象：犬/猫

保証：お買い上げ日より1年間

輸入元：モビィ株式会社

<http://www.petexjapan.com>

